

Clearfil Porcelain Bond Activator é utilizado com o Primer do Clearfil SE Bond com a finalidade de aumentar a resistência de união a porcelana ou resinas compostas fotopolimerizáveis. Contém silano, um agente de ligação que aumenta a adesão a porcelanas clinicamente comprovado.

INDICAÇÕES

Clearfil Porcelain Bond Activator possui ampla aplicação em que é necessário adesão a porcelana e compósitos:

- Reparo de coroas e próteses de porcelana ou metalo-cerâmicas.
- Restaurações indiretas com ombro cerâmico em que adesão a porcelana é necessária.
- Aumentar a retenção em inlays, onlays, coroas e laminados de porcelana.
- Aumentar a retenção em inlays e onlays de resina composta.

PROCEDIMENTO CLÍNICO

Clearfil Porcelain Bond Activator deve ser usado em combinação com o Primer do Clearfil SE Bond

1. Tratamento da superfície

A. Porcelana

Para aumentar a área de superfície, jateamento com partículas de 50 µm de óxido de alumínio. Aplicar o ácido fosfórico por cinco segundos, lavar e secar.

B. Metal

Para aumentar a área de superfície, jateamento com partículas de 50 µm óxido de alumínio.

C. Resina Composta

Aplicar ácido fosfórico a 37% por cinco segundos, lavar e secar.

2. Preparo

Dispensar um gota do primer do Clearfil SE Bond e uma gota do Clearfil Porcelain Bond Activator em um casulo e misturar.

3. Aplicação

Aplicar a mistura na superfície da porcelana. Secar com jato de ar por 2-3 segundos a fim de evaporar o solvente. Deixar agir por no mínimo 60 segundos.

4. Cimentação

As próteses podem ser cimentadas com Panavia F, de acordo com as instruções do fabricante.

PRECAUÇÃO E CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

1. Não utilizar após a data de validade. Observe a data de validade no lado de fora da embalagem.
2. Manter sob refrigeração enquanto não estiver sendo utilizado
3. Manter distante de calor excessivo e luz solar.
4. Em caso de contato com pele ou roupas, remover com um cotonete umedecido (embebido) com álcool.
5. Clearfil Porcelain Bond Activator somente ou após a mistura com o Primer do Clearfil SE Bond não deve ser usado em pacientes que possuem hipersensibilidade a monômeros metacrilatos.

RESPONSABILIDADE: *KURARAY MEDICAL INC. tem o compromisso de substituir produtos que apresentarem defeito. KURARAY MEDICAL INC. não se responsabiliza, entretanto por qualquer dano ou prejuízo, direto, resultante da má utilização ou inaptidão para uso de seus produtos.*