

CLEARFIL SE BOND

A nova geração de sistemas adesivos autocondicionante de esmalte e dentina

Clearfil Se Bond: é um sistema adesivo fotopolimerizável que reduz significativamente o tempo de procedimento, ao passo que ainda proporciona excelente resistência e selamento para restaurações fotopolimerizáveis.

Consiste em dois frascos: Primer (com Monômero ácido, autocondicionante) e Bond (Monômero hidrófobo, a base de resina). Possui o conhecido monômero adesivo MDP (10-Metacrilóiloxidecil dihidrogênio fosfato), o mesmo utilizado na série PANAVIA.

Indicação:

- Hibridização de preparo pré moldagem:
- Restaurações diretas utilizando resina composta fotopolimerizável ou compômero
- Selamento cavitário como um pré-tratamento para restaurações indiretas
- Restaurações de colo
- Reparos intra-orais de coroas de revestimento de porcelana fraturada, cerâmica híbridas ou resinas compostas utilizando compósitos fotopolimerizáveis

Vantagens:

- Autocondicionante
- Não é necessário lavar (dispensando preocupação com o nível de umedecimento da dentina)
- Rápida aplicação
- Simples manipulação
- Ausência de sensibilidade pós operatória

CLEARFIL SE BOND

Apresentação:

Clearfil Se Bond Kit Introdutório

Primer – 1,5 ml / Bond – 1,25ml



Clearfil Se Bond Full Kit

Primer – 6ml / Bond – 5ml

Dispensador com tampa

Pincéis – (2 pacotes com 50 unid./ 1 cabo)

Recipiente para manipulação



Protocolo de aplicação:

- Aplicar o primer com pincel/microbush durante 20 segundos
- Não lave
- Seque com um suave jato de ar
- Aplique o bond e remova o excesso
- Fotopolimerize por 10 segundos
- Aplique a resina composta ou compômero e fotopolimerize