

Super Filme é um carbono líquido fácil de usar, não é tóxico, de coloração azul pode ser usado tanto em consultório como no laboratório de prótese.

Indicações:

- Ajuste oclusal em contatos prematuros
- Interferências nos movimentos excursivos dos dentes naturais, metais ou porcelanas
- Ajuste interno de coroa metálica, jaqueta pura de cerâmica, inlay, onlay, prótese fixa, faceta laminada e núcleo.

Atenção: A espessura do Super Filme Kota é de 0,4 a 0,5 microns.

Contra-indicações:

- O produto não apresenta restrições de uso, porém recomenda-se apenas para fins odontológicos.

Protocolo de Aplicação:

- Agite o frasco do carbono líquido antes de usar para homogeneizá-lo.
- Aplique o Super Filme Kota e aguarde de 10 a 15 segundos para secar.
- Em consultório, coloque o carbono em um pote dappen aplicando-o com um pincel para evitar contaminação.
- Levar a peça até o preparo, onde houver interferência, o carbono líquido se solta mostrando o ponto exato em que se faz necessário o desgaste.
- Para remover, basta lavar com água ou limpar com bolinha de algodão com álcool.

Advertências e Cuidados Especiais:

- O produto deve ser armazenado em local fresco, arejado, longe do calor. Para conservar sua qualidade, o Carbono Líquido Kota deve ser mantido em sua embalagem original e bem tampado.
- Se o Carbono Líquido Kota ficar espesso, basta acrescentar gotas do solvente e agitar até obter a consistência inicial.
- Em casos de contato com a pele e a mucosa, enxaguar com água e para casos de ingestão acidental, procurar auxílio médico.

Apresentação:

- Carbono Líquido 10ml
- Solvente 20ml